

Checklista för hjärtstartare

Den här checklistan är avsedd att användas på alla hjärtstartare oavsett modell. Tänk på att alltid följa tillverkarens rekommendationer.

Kontrollpunkter för hjärtstartare

- Statusindikator?
- Kontrollera elektroder?
- Första hjälpen-kit ok?
- Skylt?
- Registrerad i hjärtstartarregistret??

Statusindikator

Kontrollera att statusindikatorn visar att hjärtstartaren är ok, statusindikatorer kan vara såväl lampa eller en display som visar att hjärtstartaren fungerar eller inte.

Elektroder

Kontrollera elektrodernas sista förbrukningsdatum inte har passerat och att förpackningen är hel och obruten.

Tillbehörs-kit ok

Kontrollera att det finns sax, rakhyvel, liten handduk eller kompress, ansiktsskydd och skyddshandskar tillsammans med hjärtstartaren.

Skylt

Kontrollera att lokalen/platsen är väl skyltad så att det är lätt att hitta hjärtstartaren i den händelse hjärtstartaren skulle behövas.

Registrering i register?

Är hjärtstartaren registrerad i hjärtstartarregistret? Är alla uppgifter korrekt. Använda gärna en mailadress som inte är knuten till person för utskick från hjärtstartarregistret.se.